
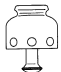
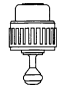



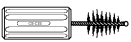
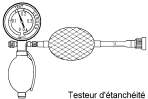




Les Accessoires de votre Fibroscope d'Intubation PENTAX

Accessoires Spécifiques :

Fibrosopes	Classiques		
	FI-7P	FI-10P2	FI-13P
 μ Valve à biopsie	-	OF-B190	
 μ Piston d'aspiration souple	-	OF-B53	
 μ Piston d'aspiration μ Joints piston	-	OF-B140 OF-B100	
 μ Bouchon lavage aspiration	-	OF-B103	
 μ Écouvillon long	-	CS-3010S	CS-6015ST
 μ Écouvillon court	-	CS-6002SN	
 μ Brosse logement de piston	-	CS-C3S	

Divers

Tous types		
 μ Testeur d'étanchéité	SH-AP2	
 μ Cale-dents autoclavable	OF-Z5	
 Source de lumière	LH-150PC	

Caractéristiques des Fibrosopes d'Intubation :

Fibrosopes	Classiques		
	FI-7P	FI-10P2	FI-13P
Ø tube d'insertion (mm)	2,4	3,5	4,2
Ø canal opérateur (mm)	-	1,4	1,8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	600		

Instruments :

FIBROSCOPE			INTUBATION STANDARD	INTUBATION SÉLECTIVE
	∅ Tube	∅ Canal	∅ Intérieur minimum (mm)	∅ Ext. (ch) / ∅ Int. (mm)*
FI-7P	2,4	-	3	28 / 3,1 ~ 32 / 3,4
FI-10P2	3,5	1,4	5	35/4,8 ~ 37/5,1
FI-13P	4,2	1,8	6	35/4,8 ~ 37/5,1 - 39/5,3 ~ 41/5,4

* Exemple : Broncho CathTM Mallinckrodt/Tyco. Pour les autres modèles, vérifier les données du fabricant.

Diamètre du fibroscope : il est indiqué en Charrière dans la référence placée sur la poignée de l'endoscope :

Exemple : FB-15P > 15 / 3,33 = 4,9 mm

Le diamètre de l'endoscope doit être adapté à celui de la sonde.


Un écart de 2 mm entre le diamètre interne de la sonde et diamètre de l'endoscope est fortement recommandé :

❖ Sonde trop grande :

- Le taux d'échec augmente
- Le risque de pliure augmente également

❖ Sonde trop petite :

- Le passage risque d'être impossible dans les fortes courbures car la lumière de la sonde s'ovalise
- Risque élevé d'écrasement et de pliure du tube

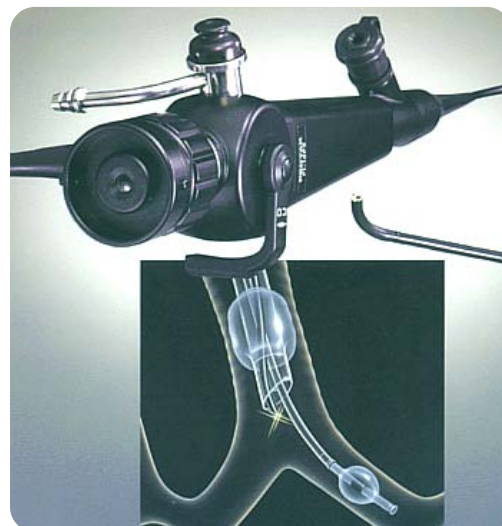

☎ INFOS Prix et disponibilité :
☎ Fax Commandes :

01 30 25 75 70
01 30 25 75 76

PENTAX France

6 Agences Régionales à votre Service
Argenteuil, Aix-en-Provence, Lyon, Metz, Rennes, Toulouse

Z.I. ARGENTEUIL, 112 Quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

☎ : 01 30 25 75 75 – ☎ : 01 30 25 75 76

www.pentax.fr

